

SURFACE/ DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

LINGETTES SPORICIDES - DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

1 / 8

Large spectre et temps de contact courts
pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles
Compatible avec presque **tous les matériaux**
Pas de résidus toxiques ou polluants
Excellente performance de nettoyage



Un seul produit
pour toutes les
surfaces



SURFACE/ DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

2 / 8

DESCRIPTION

ULTRAefficace. ULTRArapide. ULTRAcompatible.

ULTRASOL OXY WIPES sont des lingettes désinfectantes très efficaces dont le pouvoir oxydant permet la désinfection et le nettoyage des équipements et dispositifs médicaux lorsque les exigences en matière d'hygiène sont les plus élevées. Les lingettes ont un excellent spectre d'activité contre les bactéries et les virus, y compris les spores.

ULTRASOL OXY WIPES ne laisse aucun résidu toxique ou nocif pour l'environnement sur les surfaces traitées et se caractérisent par une très bonne compatibilité avec les matériaux qui offre une garantie pour une utilisation sûre.

UTILISATION ET REMARQUES

Conformément au règlement sur les produits biocides (BPR)

Pour la désinfection et le nettoyage rapides du matériel médical sensible à l'alcool et des surfaces de tout type.

Conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux

Pour la désinfection finale et le nettoyage des dispositifs médicaux semi-critiques.

Autres domaines d'application

Outre le secteur médical, ce produit convient également au secteur alimentaire et aux cuisines des collectivités, dans le secteur industriel et les établissements publics.

Application

Essuyer les surfaces avec ULTRASOL OXY WIPES de manière à humidifier l'entièreté de la surface. Dans le cadre d'une utilisation de routine, les surfaces désinfectées peuvent être réutilisées immédiatement après séchage.

Pour la désinfection ciblée des dispositifs médicaux semi-critiques, le temps d'exposition avant réutilisation doit être pris en compte. Utiliser des équipements de protection individuelle (gants).

Convient à la désinfection des dispositifs médicaux semi-critiques (ex : les sondes). Lors de l'utilisation, veuillez suivre les instructions fournies par le fabricant du dispositif médical. Lors de la désinfection des incubateurs pour prématurés, les directives KRINKO doivent être respectées.

Conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux, les utilisateurs/patients sont tenus de signaler tout incident grave lié au dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur/patient est établi.

Nos lingettes **ULTRASOL OXY WIPES XL** sont particulièrement adaptées à la désinfection de grandes surfaces.

Les lingettes pré-imprégnée offrent facilité et confort d'utilisation pour un gain de temps dans les conditions les plus difficiles.

Durée de conservation après ouverture:

ULTRASOL OXY WIPES: 42 jours

ULTRASOL OXY WIPES XL: 42 jours

Composition

100 g de solution contient : 7 g de peroxyde d'hydrogène, 0.1 g d'acide peracétique, 0.1 g d'acide glycolique.

Compatibilité des matériaux

Large gamme d'applications sur les surfaces et les dispositifs médicaux. (voir page 4-6)

Enregistrement du produit

Double enregistrement (dispositif médical/biocide)

Mises en garde et mentions de danger

Provoque une grave irritation des yeux. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient à une entreprise de collecte agréée ou selon la réglementation locale. Réservé à un usage professionnel par du personnel possédant les connaissances requises conformément aux directives nationales.

Utiliser les désinfectants en toute sécurité.

Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

SURFACE/ DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

SPECTRE D'ACTIVITÉ ET TEMPS DE CONTACT

3 / 8



SPECTRE D'ACTIVITÉ ET TEMPS DE CONTACT*			30 s	1 min	5 min	10 min	15 min
Recommandation pour la désinfection des surfaces							
bactéricide ¹ , levuricide ¹	VAH EN ²	avec action mécanique, conditions propre et sale			•		
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	conditions propre et sale			•		
mycobactéricide (M. terrae, M. avium)	EN 14348	conditions propre et sale			•		
sporicide contre C. diff. Ro27 dans le secteur médical	EN 17126	conditions propre et sale			•		
sporicide (B. subtilis, B. cereus)	EN 17126	conditions propre				•	
	EN 17126	conditions sale					•
fongicide (A. brasiliensis)	EN 13624	conditions propre et sale			•		
virucide	EN 14476	conditions propre et sale			•		
virucide à spectre limité	EN 14476	conditions propre et sale		•			
résultats de tests complémentaires							
bactéricide (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ³)	EN 13727	conditions propre et sale	•				
	EN 16615	avec action mécanique, conditions propre et sale			•		
levuricide (Candida albicans)	EN 13624	conditions propre et sale	•				
	EN 16615	avec action mécanique, conditions propre et sale			•		
actif contre les polyomavirus	EN 14476	conditions propre et sale		•			
actif contre le poliovirus	EN 14476	conditions propre et sale			•		
active contre les norovirus (MNV)	EN 14476	conditions propre et sale		•			
actif contre l'adénovirus	EN 14476	conditions propre et sale		•			

*Le spectre d'activité et les temps de compte s'appliquent à la fois pour l'utilisation comme biocide et comme dispositif médical.

1 – Inclut test phase 2 étape 1 – et phase 2 étape 2 (tests quantitatifs en suspension et tests pratiques sur porte-germes)

2 – EN 13624, EN 13727, EN 16615 + 3rd round, VAH Methode 8

SURFACE/ DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

4 / 8



MATÉRIAUX Métaux	non recommandé	utilisation limitée	recommandé	APPLICATION Exemples
Inox			•	Acier inoxydable
			•	Chaise roulante, pied à perfusion
			•	Chaise de toilette
			•	Déambulateur
aluminum		•		
cuivre	•			
laiton	•			

SURFACE/ DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

5 / 8



MATÉRIAUX PLASTIQUES : ELASTOMÈRES	non recommandé	utilisation limitée	recommandé	APPLICATION Exemples
silicones			•	Masques de protection
			•	Masques à oxygène
			•	Clavier et souris d'ordinateur
			•	Sac de réanimation
PUR (polyuréthane)			•	Fauteuil roulant
CR (néoprène)			•	
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)			•	Chariot de soins
TPS (styrène TPE)			•	
NBR (nitrile butadiene rubber)			•	

SURFACE/DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

6 / 8



MATÉRIAUX PLASTICS: THERMOPLASTICS	non recommandé	utilisation limitée	recommandé	APPLICATION Exemples
PC (polycarbonate, par exemple Makrolon)				- Appareils à ultrasons - Appareils d'IRM - Appareils EEG - Dispositifs ECG - Appareils de tomodensitométrie
PC/ABS (polycarbonate/acrylonitril-butadiène-styrène)				- Appareils à rayons X - Sondes à ultrasons, ex : sondes transvaginales et abdominales - Couveuses
ABS (acrylonitril-butadiène-styrène)				- Moniteurs de surveillance des patients - Claviers et souris d'ordinateur/moniteur
PEI (polyétherimide)				Conteneurs de stérilisation et de transport
PMMA (polyméthacrylate de méthyle)				Couveuses en acrylique et en plexiglas
PA (polyamide)				Cuves à pression artérielle
PE-HD (polyéthylène haute densité)				Conteneurs de stockage et de transport
PP (polypropylène)				Tuyaux flexibles
PVC (polychlorure de vinyle)				- Sac à oxygène - Sac pour mannequin d'entraînement - Sac d'urgence

SURFACE/DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

POUR COMMANDER

7 / 8

Produits	Conditionnement	Unité	Contenu	Taille des lingettes	REF
ULTRASOL OXY WIPES	Paquet	6	108 Wipes	20 x 20 cm	00-270-T108
ULTRASOL OXY WIPES XL	Seau souple avec poignée	4	120 Wipes	17,5 x 36 cm	00-270-OSEB120

Les produits peuvent différer selon les pays. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant Filter Service

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  C€ 0482

CERTIFICATIONS



Dr. Schumacher est certifié selon les normes DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, a un système de gestion de l'environnement validé selon EMAS et est membre de IHO, VCI, BAH, DGSV et de la DGKH.

SURFACE/DÉSINFECTANTS PRÊT À L'EMPLOI

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

FAMILLE DE PRODUITS

8 / 8



ULTRASOL OXY® WIPES



ULTRASOL OXY® WIPES XL



ULTRASOL OXY®



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE LINGETTES NON-WOVEN RECOMMANDÉS



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES