

Désinfection rapide

DESCOCEPT SENSITIVE

Désinfectant rapide à base d'alcool

- Idéal pour la désinfection de routine
- Efficacité rapide
- Excellente compatibilité avec les matériaux



Description

DESCOCEPT SENSITIVE est un désinfectant rapide, prêt à l'emploi, à base d'éthanol, pour la désinfection et le nettoyage en douceur des dispositifs et équipements médicaux ainsi que des surfaces de tous types. Le produit est particulièrement adapté aux zones proches des patients pour lesquelles un large spectre d'activité est requis. En plus de fournir une désinfection efficace en très peu de temps, le produit a une très bonne compatibilité avec les matériaux.

Domaines d'application

Conformément à la Biocidal Products Regulation (BPR) :

Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux résistants à l'alcool et de tous types de surfaces, particulièrement dans l'entourage du patient.

Conformément à EU Medical Devices Regulation :

Pour la désinfection rapide et le nettoyage des dispositifs médicaux non-invasifs, spécialement conçu pour les surfaces sensibles des dispositifs médicaux.

Utilisation

Pour une couverture efficace, appliquer la solution non diluée uniformément sur les surfaces résistantes à l'alcool et les maintenir humides pendant le temps d'action requis.

Conformément à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux,

Spectre d'action et temps de contact			30 s	1 min	2 min	3 min
Recommandations d'utilisation						
Bactéricidie, levuricide*	VAH/EN 16615	avec action mécanique conditions sales			•	
Bactéricidie, levuricide*	EN 13697	sans action mécanique, conditions propres et sales		•		
Tuberculocidie (M. terrae)	EN 14348	conditions propres	•			
		conditions sales		•		
Mycobactéricidie (M. avium)	EN 14348	conditions propres		•		
Spectre virucide limité	EN 14476	conditions propres				•
	EN 16777	conditions propres				•
Actif contre les virus enveloppés	EN 14476	conditions propres et sales	•			
	EN 16777	conditions propres		•		

* inclut tests phase 2 step 1 et phase 2 step 2 (tests quantitatifs en suspension et sur porte-germes)

Les utilisateurs/patients sont tenus de signaler tout incident grave survenu dans le cadre de l'utilisation d'un dispositif médical au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur/patient est établi.

A noter

DESCOCEPT SENSITIVE peut être utilisé en lingettes ou en spray. Enregistrement biocide PT2 (surfaces médicales)

Composition

100 g solution contiennent : 45 g d'éthanol.

Compatibilité avec les matériaux

Descosept Sensitive offre une excellente compatibilité sur les matériaux SAUF sur les matériaux suivants: polyméthylméthacrylat (PMMA) et aluminium. L'utilisation sur les matériaux suivant est autorisée sous certaines conditions : laiton et polyéthylène téréphthalate (PET).



DESCOCEPT SENSITIVE

Désinfectant rapide à base d'alcool

Rapports d'expertise

Nous avons un dossier complet reprenant tous les rapports d'expertise relatifs aux normes. Nous nous ferons un plaisir de vous les faire parvenir sur demande.

Avertissement et danger

Liquide et vapeur inflammables. Si un avis médical est nécessaire, avoir le produit ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/le contenant dans une entreprise de collecte agréée selon la réglementation locale.

Pour usage professionnel uniquement par des personnes ayant les compétences requises selon les recommandations nationales.

Spectrum of efficacy and contact times			30 s	1 min	2 min	3 min
Additional test results						
Bactéricidie	EN 16615	conditions sales			•	
	EN 13697	conditions propres et sales		•		
	EN 13727	conditions sales		•		
	EN 1276	conditions sales		•		
Levuricidie	EN 16615	conditions sales			•	
	EN 13697	conditions propres et sales		•		
	EN 13624	conditions sales		•		
	EN 1650	conditions sales		•		
Actif contre les virus enveloppés	RKI/DVV		•			
Actif contre le rotavirus	EN 14476	conditions propres	•			
Actif contre l'adenovirus	EN 14476	conditions propres				•
	EN 16777	conditions propres				•
Actif contre le norovirus (MNV)	EN 14476	conditions propres et sales		•		
	EN 16777	conditions propres				•
Actif contre le vaccinia virus	EN 14476	conditions propres et sales	•			
	EN 16777	conditions propres		•		
Actif contre le corona virus	EN 14476	conditions sales	•			

* inclut tests phase 2 step 1 et phase 2 step 2 (tests quantitatifs en suspension et sur porte-germes)

Produit	Unité	Contenu	Unité	REF
DESCOCEPT SENSITIVE	flacon	500 ml	20	00-323DS-005
	flacon + spray	750 ml	6	00-323DS-0075-02
	flacon	1 l	10	00-323DS-010
	bidon	2,5 L	3	00-323DS-025
	bidon	5 L	3	00-323DS-050
	bidon	10 L	1	00-323DS-100

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

La disponibilité des produits et des différents conditionnements dépend de leur enregistrement respectif au niveau national.

Utilisez les désinfectants avec prudence. Lisez toujours la notice du produit avant utilisation.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com